

血清中インジウム検査のご案内

京都工場保健会衛生検査所では平成23年4月よりICP-MSを導入し、血清中インジウム検査の分析を実施しています。

実績

平成23年6月から平成27年7月までに
22206件の検査を実施しています。



分析結果報告(納期)

検査所要日数 **7**日

(当検査所稼働日において
受付日の翌日を1日目とします)

	平均日数	最長日数
26年度上期	2.41	5
26年度下期	2.34	5

インジウムについて




平成25年1月1日付で労働安全衛生関係規則が改正され、インジウム化合物を取り扱う作業者は特殊健康診断において血清中インジウム濃度の検査が必要となっています。

インジウム化合物は主に液晶パネル、タッチパネル、太陽電池などの電極に使用されています。また、研削粉の吸入によって、発がん性を含む肺疾患を起こすことが確認されており、健康への影響が懸念されています。




梱包説明

梱包箱

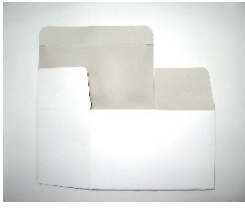

しきり

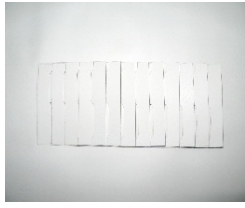


キャッチクール
(吸水式保冷剤)



ダンボール



保冷用バック

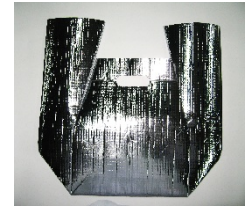

チャック付ビニール袋

検査依頼書

手順

事前にキャッチクール()に水を含ませ冷凍してください

白い梱包箱()を組み立て、中にしきり()をはめます。

このとき、しきりがはずれやすいので注意してください。

スピッツを入れ、ふたを閉めます。・・・(A)



チャック付ビニール袋()の中に(A)とキャッチクール()を入れ、なるべく空気が入らないようにしてビニール袋を閉じます。(B)
ダンボール()の底をガムテープでとめて組み立て、中に(B)を入れます。



上部をガムテープでとめたダンボールと検査依頼書()を
保冷用バック()に入れます。

左右の端を折りたたみ、中央をガムテープでしっかりとめてください。



お問い合わせ・送付先

〒 604-8472 京都市中京区西ノ京北壺井町67番地

一般財団法人京都工場保健会衛生検査所

TEL 075-823-2591

FAX 075-823-0527

担当：福井 良成 (フクイ ヨシナリ)



y-fukui@hokenkai.jp



<http://www.kyotokojohokenkai.jp/health/>